

PayPal

Micro Trace Minerals Labor

Über 40 Jahre umweltmedizinische und toxikologische Untersuchungen

Röhrenstrasse 20 91217 Hersbruck Germany

Telefon: +49 (0) 9151/4332 Telefax: +49 (0) 9151/2306

info@microtrace.de www.microtrace.de



PATIENTENINFORI	MATION: Stuhlunt	ersuchungen					
Überweisung Klinik/Pra	axis:						
		Bei Neukunden bzw. Adre	essänderung bitte 2. Seite ausfüllen.				
Vor- und Zuname des Pa	atienten:						
Straße:		PLZ:	Wohnort:				
Bundesland:		Land:					
Telefon:		Fax:					
eMail:							
wird nu	wird nur benötigt, wenn Befundversand per eMail (bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)						
Geb. Datum:		Geschlecht:	m w Beruf:				
			reit, die anfallenden Kosten zu übernehmen. Rückerstattung von Privatkassen ist eventuell möglich.				
Datum:	Patienten U	nterschrift:					
			(bitte nicht vergessen)				
Auftrag zur Stuhlur	<u>ntersuchungen:</u>						
Standardprofil (P39)		12 Elemente	128,28 € inkl. MwSt.				
Getestet werden: Antimon, Arsen-Gesamt, Beryl	lium, Blei, Cadmium, Kupfer, Nick	el. Quecksilber, Silber, Uran.	Wismut Zinn				
Erweitertes Profil (P38)		31 Elemente					
Getestet werden Parameter v Aluminium, Barium, Caesium, Vanadium, Wolfram, Zink	•	, Mangan, Molybdaen, Platin,	Selen, Strontium, Tantal, Thallium, Titan,				
Gold			35,34 € inkl. MwSt.				
Testmaterial:	5 gramm Stuhl	Entgiftu	ngsmittel / Chelatbildner (bitte nennen):				
Stuhl vor der Entgiftung	Stuhl nach Entg	iftung					
Symptome (falls bekannt):							
Zahlung per:	Rechnung an:	Praxis/Klinikadre	esse Patientenadresse				
Kreditkarte	VISA Master	card Kartennummer:					
gültig (MM/JJ):	Secur	ity-Code: L	Unterschrift:				
Rechnung	Überweisung erfol	gte am:	über €:				

Zahlung wurde an Adresse: service@microtrace.de gesendet

Außerhalb Deutschlands ist die Zahlung per Vorauskasse oder Kreditkarte erforderlich, ansonsten wird die Probe bis Zahlungseingang zurückgehalten.

Weitere Informationen

Stuhlmetalle

- Die Metalluntersuchung kann vor oder nach einer Entgiftung durchgeführt werden.
- Die Stuhl-Metalluntersuchung erlaubt die Überwachung und Kontrolle oraler Entgiftungstherapien. Orale Chelatoren wie DMSA, DMPS oder EDTA, auch Suppositoren, wie auch die orale Gabe freier Aminosäuren und Vitamin C binden Metalle im Verdauungstrakt. Dies kann zu einer erhöhten Metallbindung und -ausscheidung in Stuhl führen. Da Stuhl ein Material ist, das wesentlich schwieriger zu kontrollieren ist als Urin, haben wir ein Probeentnahme-Protokoll erstellt, das Nahrungsmitteleinflüsse reduziert ohne Entgiftungsprozesse wesentlich z beeinflussen.

Protokoll zur Stuhlentnahme

- Bei Patienten mit Darmerkrankungen oder solchen, die zu Durchfall neigen, vorher unbedingt Arzt befragen.
- Nehmen Sie 1-2 Wochen vor der Entgiftung ein Probiotika ein und zwar 2 Kapseln 3x t\u00e4glich jeweils vor oder na dem Essen.
- Essen Sie bis zu 4 Tagen vor Beginn des oralen Entgiftungsprogramms (auch vor Suppositorenverabreichung) keinen Fisch und keine Algenprodukte (Chlorella, Spirulina etc.)
- Nehmen Sie zwei Tage vor Beginn des Programms keine N\u00e4hrstoffpr\u00e4parate oder Medikamente ein, au\u00dfer dies sind lebensnotwendig.
- Am Tag der Entgiftung sollte das Entgiftungsmittel auf nüchternen Magen mit 2 Gläser lauwarmem Wasser eingenommen werden.
- Am Tag vor der Entgiftung sollte der Darm gut entleert werden. Fragen Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker nach einer geeigneten Maßnahme (z.B. Bittersalz etc.)
- Wird orales DMSA verabreicht, sollte es ebenfalls auf nüchternen Magen eingenommen werden. Die hauptsächliche Metallbindung findet während der ersten 4-6 Stunden statt, deshalb sollte die post-Stuhlentnahm erst nach diesem Zeitraum vorgenommen werden.
- Für die Probeentnahme legen Sie einige Blätter Toilettenpapier in die Toilette. Die Stuhlentleerung sollte, wenigstens zum Teil, darauf erfolgen. Entnehmen Sie etwas Stuhl mit der Spatula, die sich in dem vom Labor zu Verfügung gestellten Röhrchen befindet und füllen Sie das Röhrchen. Dieses sollte vor dem Probeversand mit Patientenname beschriftet und dann in die Plastikschutzhülle gegeben werden.
- Plastikschutzhülle mit Stuhlröhrchen mit vervollständigtem Patienteninformationsblatt per Post versenden.

Reportversand an:	Praxis/Klini	kadresse	Patientenadresse	bei	de Adressen (gegen Aufpreis € 9,95)	
Reportversand per:	Post	E-Mail	Fax			
Einzelelemente können	auf Anfrage 2	zusätzlich u	nd gegen Aufpreis ge	testet we	rden. Wir bitten um Rücksprache.	
Bemerkungen zum Tes	t, bzw. weiter	e zu testend	le aufpreispflichtige Ei	nzelelem	ente:	
Bei Neukunden bzw. A	dressänderur	ng bitte ausfi	üllen:	oder	Praxis/Klinik Stempel	
Adresse:						
Telefon:						
Fax:						
eMail:						
Barcode St			Barcode St before		Barcode St after	`
Das Formular könner	Sie auch am	PC ausfüllen	hitte hesuchen Sie: ht	tn·//www.r	nicrotrace de/de/einsendeformulare/	